

FDG optrek en toedien systeem



Een wolfram afscherming voor spuiten van 5 ml, 10 ml of 20 ml, waarbij de spuit via een staaf op afstand kan worden bediend. Vanuit een vial in de dosiscalibrator wordt FDG opgetrokken, via de “verschil” meetmethode wordt de activiteit bepaald. Hierdoor hoeft de spuit niet meer nagemeten te worden waardoor de spuit niet meer uit de afscherming moet worden gehaald.

In dezelfde afscherming wordt de dosis getransporteerd naar de patiënt, ook de toediening vindt plaats vanuit deze afscherming. Hiermee wordt voor manuele toediening een optimale bescherming geboden tijdens de hele procedure van het optrekken tot het toedienen.

Bestelnummer 856.150 & 856.200

Afscherming: 20 mm wolfram
Producent: Vanderwilt Techniques

